

# DIARFLEX® Fäkalkollektor



## Das einfache und effektive Ableitsystem

Für ein hygienisches Ableiten von flüssigem und halbflüssigem Stuhl und dessen sicheres Auffangen bei bettlägerigen oder immobilen und inkontinenten Patienten




### VORTEILE:

- ✦ Verringert unangenehme Geruchsentwicklungen dank des integrierten AKTIVKOHLEFILTERS
- ✦ Einfache Handhabung für eine bessere Versorgungseffizienz
- ✦ Hautfreundliches HYDROKOLLOID-PFLASTER:
  - wirkt feuchtigkeitsabsorbierend
  - hohe FLEXIBILITÄT und hervorragendes HAFTVERMÖGEN durch besonders dünne Form
- ✦ Minimiert den Kontakt mit Stuhl
- ✦ Verringert dermatologische Komplikationen (bis hin zum Dekubitus)
- ✦ Wiederverschließbarer Beutelauslass
- ✦ Vereinfacht die Berechnung des Flüssigkeitsverlustes
- ✦ Auffangvolumen von 1.000 ml
- ✦ Latexfrei
- ✦ DEHP-frei

DIARFLEX® Fäkalkollektor		
Art.nr.	VPE	PZN
20775	10 Stück	13652313



## HAUSCHONEND UND SICHER

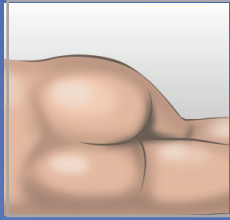


1. Patient mit angezogenen Knien in Seitenlage positionieren.


Den perianalen Bereich mit warmem Wasser reinigen, die Behaarung im diesem Bereich entfernen und alles sorgfältig abtrocknen. Hautunebenheiten können mit einer Hautschutzpaste ausgeglichen werden.




2. Nun ist zu prüfen, dass die Beutelöffnung des DIARFLEX® Fäkalkollektors mit der Verschlusskappe sicher verschlossen ist.

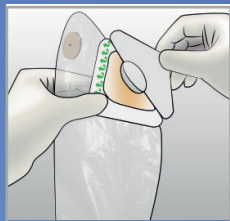


3. Zum Anbringen des Kollektors das Abziehpapier vom Hautschutz entfernen, die darunter liegende Schutzfolie aber noch an der Klebefläche belassen. Den Hautschutz dann diagonal falten.

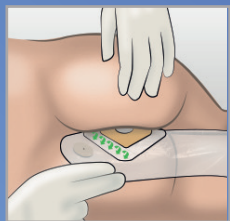


4. Nun die Gesäßfalten vorsichtig auseinanderziehen und den Hautschutz am Perineum (Damm) anbringen, fest andrücken und einige Sekunden gedrückt halten.

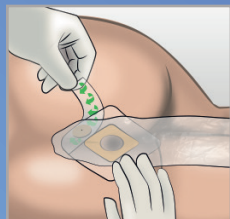

5. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Hautschutz und drücken Sie den freiliegenden Teil des Hautschutzes ebenfalls fest an. Schneiden Sie sofern es notwendig ist, die Klebefläche im Bereich der Hoden bzw. der Vagina vorsichtig aus.

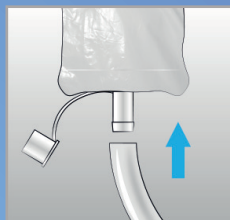

6. Legen Sie den Beutel zwischen die Beine des Patienten. Vermeiden Sie dabei Faltenbildung und mögliche Druckbereiche. Entfernen Sie die Verschlusskappe und schliessen Sie dort den Schlauch eines Bett- oder Nachtbeutels an.

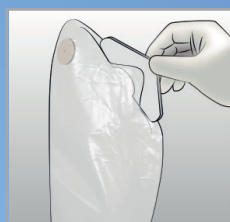

7. Zum Entfernen des Fäkalkollektors ist die Verschlusskappe zu schließen. Dann den Hautschutz vorsichtig von der Haut des Patienten lösen und falten, so dass ein geschlossenes System entsteht und dieses entsorgen.

**Primed**<sup>®</sup> Halberstadt  
Medizintechnik GmbH  
Straße des 20. Juli 1  
D-38820 Halberstadt  
Tel. 0049 (0) 3941 - 668 6  
Fax. 0049 (0) 3941 - 245 65  
[www.primed-halberstadt.de](http://www.primed-halberstadt.de)  
[primed@primed-halberstadt.de](mailto:primed@primed-halberstadt.de)