

Stepty

Absorptionsfähiger Druckverband mit exzellenter blutstillender Wirkung (Einwegprodukt)

Nach dem Entfernen der Nadel bei Blutabnahmen oder dem IV Zugang kann der Stepty Druckverband als Wundauflage für exzellente Blutabsorption und Kompression verwendet werden.

Das elastische Klebeband aus Urethan-Vliesstoff ermöglicht einen adäquaten Druckaufbau.



STEPTY dient als blutstillende und schützende Abdeckung nach Blutentnahme, Blutinfusionen und Tropfinfusionen.

PRODUKTFEATURES

- **Wundauflage**
 - die 27x10 mm große Wundauflage bedeckt das Loch der Einstichstelle in Haut/ Blutgefäß
 - 6 mm dicke Wundauflage ermöglicht exzellente Blutabsorption
 - enthält keinen Blutstiller
- **Klebeband**
 - aus Urethan-Vliesstoff gefertigt für hervorragende Elastizität und Flexibilität
 - über 90% Formstabilität für einen adäquaten Druckaufbau
 - enthält hypoallergenen Acrykleber
- **Schutzpapier**
 - Vergrößertes Schutzpapier für eine einfache Entfernung

Anwendungshinweise

Schritt 1 Entfernen Sie das Schutzpapier **nicht vollständig**. Kleben Sie den mittleren Bereich des Klebebandes auf die Haut auf und dehnen Sie ihn dabei um etwa **1 cm** (bei **STEPTY P** um 2 cm).


Mit dem Schutzpapier zusammenhalten.



Nicht überdehnen!


Schritt 2 Üben Sie keine Kraft auf das Klebeband aus, sobald das Schutzpapier entfernt wurde, sondern **streichen** Sie **darüber**, um es anzukleben.

Das Schutzpapier bis zu diesem Zeitpunkt dranlassen.

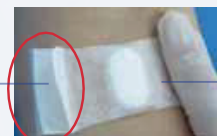

Die Enden des Klebebandes nicht dehnen.

Spitze: Wenn das Pflaster zugezogen wird, konzentriert sich die Kraft und kann zu Hautausschlag führen.

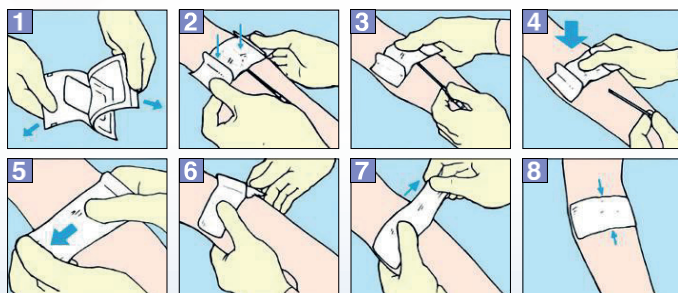

1. Öffnen Sie den sterilisierten Umschlag in Pfeilrichtung und nehmen Sie das **Stepty** heraus.
2. Richten Sie direkt vor dem Herausziehen der Nadel oder des Katheters die Längsseite der Wundauflage in Fließrichtung des Blutes aus, arrangieren Sie die Wundauflage so, dass sich die Einstichstelle der Nadel

oder des Katheters in der Mitte befindet, und halten Sie es vorläufig fest.

3. Ziehen Sie die Nadel oder den Katheter heraus und halten Sie die Wundauflage dabei leicht mit dem Finger fest.
4. Üben Sie zum Zeitpunkt des Herausziehens der Nadel oder des Katheters mit dem Daumen stärkeren Druck auf die Wundauflage aus.
5. Üben Sie weiterhin verhältnismäßig stärkeren Druck aus, so dass die Wundauflage nicht verrutscht, dehnen Sie das Klebeband um eine Daumenbreite und kleben Sie es fest auf die Haut.
6. Achten Sie darauf, dass die Wundauflage nicht verrutscht, wechseln Sie den Daumen und üben Sie weiterhin Druck aus.
7. Üben Sie weiterhin starken Druck aus, so dass die Wundauflage nicht verrutscht, dehnen Sie das andere Ende des Klebebandes um eine Daumenbreite und kleben Sie es fest auf die Haut.
8. Das Anbringen von **Stepty** ist abgeschlossen. Die Wundauflage ist gesichert, als ob sie verbunden wäre.

Stepty No. 80 EU, weiß, steril	Größe		VE	Artikelnummer
	Klebefläche	Polsterfläche		
	39 x 80 mm	27 x 5 mm	50 Stück	70170

Vertrieb durch:

Primed® Halberstadt Medizintechnik GmbH * Straße des 20. Juli 1 * D-38820 Halberstadt * Tel.: +49 (0) 3941-668-6 *
Fax: +49 (0) 3941-24565 * primed@primed-halberstadt.de * www.primed-halberstadt.de

Hersteller: Nichiban Co., Ltd. Tokyo 8663

Stepty P

Absorptionsfähiger Druckverband mit exzellenter blutstillender Wirkung nach dem Entfernen einer gesetzten Nadel an der radialen Arterie bzw. dorsalen Arterie des Fußes (Einwegprodukt)

Durch die Kombination einer Wundauflage mit Platte und dem flexiblen Klebeband kann eine hervorragende blutstillende Wirkung durch Kompression auf die Einstichstelle, erzielt werden.


Der Druck, der durch Klebebänder aus Urethan-Vliesstoff ausgeübt wird, erhöht sich mit der Länge des angebrachten Klebebands. Etwa 2 cm Klebeband auf jeder Seite bietet ein effizientes Maß an Druck (ca. 100 mmHg) und behält ca. 80% der Originalkraft nach 1 Stunde Verwendung bei.

PRODUKTFEATURES

- Mittels Wundauflage wird ein sanfter und effektiver Druck auf die Haut ausgeübt
- Zusätzliche Platte für erhöhten Druck und Sicherheit
- Flexibles Klebeband aus Urethan-Vliesstoff
- Hypoallergener Acrykleber
- Größere Wundauflage bedeckt das Loch der Einstichstelle in der Haut und im Blutgefäß



STEPTY P wird verwendet zur Blutstillung und als Schutzabdeckung für die radiale Arterie bzw. dorsale Arterie des Fußes nach Punktionen aufgrund von Messungen des arteriellen Drucks oder Blutgaswertes.

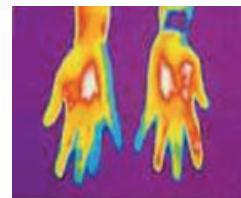


Wärmebild der Handflächen mit angebrachtem „STEPTY“

Vergleich der Handflächen nach der Anwendung von

Stepty P für 2 Stunden und ohne Verwendung des Produktes.

Es ist kein Temperaturunterschied der Hautoberfläche erkennbar, was zeigt, dass es keine Beeinträchtigung der Durchblutung bei der Anwendung von **Stepty P** gibt.

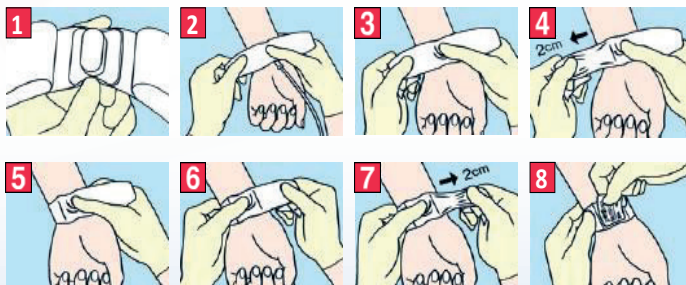

1. Nehmen Sie das **Stepty P** aus der Verpackung. Markieren Sie das Pflaster mit Ihren Fingerspitzen entlang der eingekerbten Stelle in der Mitte der Platte, um den Wundauflagebereich zu markieren.
2. Legen Sie die Wundauflage so auf, dass sie sowohl die punktierte Einstichstelle der Haut, als auch die des Blutgefäßes abdeckt. Entfernen Sie nun

langsam die Nadel bzw. den Katheter.

3. Sobald die Nadel bzw. der Katheter **VOLLSTÄNDIG** entfernt wurde, üben Sie mit dem Daumen festen Druck auf die obere Fläche (Rückseite) des Pflasters aus.
4. Ziehen Sie das Schutzpapier des Pflasters auf einer Seite teilweise ab, dehnen dieses ca. 2 cm nach außen.
5. Befestigen Sie es vorsichtig mit leichtem Druck an der Haut.
6. Führen Sie nun einen Daumenwechsel durch und ziehen Sie die zweite Schutzfolie teilweise ab.
7. Dehnen Sie nun auch die zweite Seite des Klebebandes um ca. 2 cm nach außen und bringen diese vorsichtig an der Haut an.
8. Schreiben Sie nun die Zeit auf den mitgelieferten Klebezettel und befestigen dieses auf der Oberseite des **Stepty P**. Je nach Person stoppt die Blutung nach ca. 60 Minuten.

Stepty P No. 120 P EU weiß, steril	Größe			VE	Artikelnummer
	Klebefläche	Polsterfläche	Plattenfläche		
	40 x 120 mm	27 x 15 mm (9 mm dick)	36 mm x 30 mm	30 Stück	70171

Vertrieb durch:

Primed® Halberstadt Medizintechnik GmbH ★ Straße des 20. Juli 1 ★ D-38820 Halberstadt ★ Tel.: +49 (0) 3941-668-6 ★
Fax: +49 (0)3941-24565 ★ primed@primed-halberstadt.de ★ www.primed-halberstadt.de

Hersteller: Nichiban Co.,Ltd. Tokyo 8663